

Guide pour bien choisir et bien ajuster votre patch Gecko

1. Imprimez cette page.
2. À l'aide de ciseaux, découpez les patrons en suivant les pointillés. Les modèles sont de taille réelle.
3. Le **patch taille Large est considéré comme le choix standard**. Il est idéal pour les masques tailles Médium, Large et Extra-Large. Le patch taille Small convient parfaitement aux masques tailles Small, Extra-Small et Petite.
4. Placez successivement les deux patrons sur votre visage afin de déterminer la taille de patch à utiliser. **Si votre taille se situe entre les deux, nous vous recommandons d'utiliser la taille Large.**



À titre indicatif, les ailes du patch doivent s'arrêter entre les pupilles et les coins externes des yeux, comme indiqué ci-dessus.

Le patch peut être facilement ajusté selon différents angles pour s'adapter aux contours du visage de chaque patient.

Bien choisir la taille du patch et bien l'ajuster vous garantit un meilleur confort avec votre masque.



Idéal pour les masques de tailles
MÉDIUM, LARGE et EXTRA-LARGE.

Patch taille Large

Largeur maximale : 10,7 cm Hauteur maximale : 5,1 cm



Idéal pour les masques de tailles
SMALL, EXTRA-SMALL et PETITE.

Patch taille Small

Largeur maximale : 8,9 cm Hauteur maximale : 3,8 cm



Gecko™
NASAL PAD

© ResMed 2011 618195/1 2011-07